



Bruksanvisning

Massagefåtölj Santé Hoshi 3D



Spara denna bruksanvisning
Save these instructions



www.santesweden.se

+46 20 27 27 20 • info@santesweden.se

Grattis till din massagefåtölj Santé Hoshi 3D

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din massagefåtölj och för att du ska kunna använda den på rätt sätt, är det viktigt att du noggrant läser igenom säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen innan du använder massagefåtöljen.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 020-27 27 20 eller e-post info@santesweden.se

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktion.....	1
Justera axelmassagen	2
Snabbstarta ett automatiskt massageprogram.....	3
Automatiska massageprogram.....	4
Övriga justeringar.....	5
Manuell styrning av massagen.....	6-7
Styr massagefåtöljen med app.....	8
Montering av massagefåtöljens sidostycken	9-10
Garantivillkor och EU-deklaration	11
Tekniska specifikationer	12

Säkerhetsinstruktion

OBS!

Massage i Santé Hoshi 3D är mycket behagligt, avslappnande och välgörande. För att din upplevelse ska bli så positiv som möjligt är det viktigt att du läser nedanstående säkerhetsinstruktion före användandet av massagefåtöljen.

Rekommenderad användning är max 30 min/dag. Max 5 min. på samma punkt vid manuell massage. Avbryt vid ev obehag med:



Låt alltid massagefåtöljen resa upp din kropp

Reser du dig för hastigt efter massagen kan det orsaka yrsel. Känsliga personer kan känna svimningssymptom. För att återgå till sittläge tryck på PÅ/AV-knappen 2 gånger.



Drick rikligt med vatten efter massagen!

Massagen frigör slaggprodukter i musklerna som transporteras bort den naturliga vägen. Det är därför viktigt att dricka minst två stora glas vatten efter massagen.



Tänk på hygien

Tvätta eller sprita gärna händerna innan användning. Torka av massagefåtöljen efter att du har använt den.



Följande personer bör konsultera läkare före användning av massagefåtöljen:

- Personer med kända rygg- eller nackbesvär. Exempelvis diskbräck eller whiplashskada.
- Personer med hjärtbesvär
- Personer med inopererad elektronisk utrustning exempelvis pacemaker
- Kvinnor som är gravida eller är under menstruation
- Personer med maligna tumörer
- Personer med onormal eller böjd ryggrad
- Personer som önskar använda massagefåtöljen på kroppsdel som tidigare varit skadad eller fått medicinsk behandling.
- Personer med feber högre än 38 °C
- Personer med svag benstomme (osteoporosis etc.)
- Personer med allvarliga cirkulationsproblem i benen.
- Personer som är ordinerade total vila

För rådgivning kontakta Santé Sweden AB på telefon 020-27 27 20 eller maila till info@santesweden.se

Justera axelmassagen


Innan du sätter dig i massagefåtöljen är det viktigt att du justerar bredden på klaffarna för axelmassagen.

Pressa dig aldrig in emellan klaffarna. Dom riskerar då att brytas




1. Nollställ axelklaffarna

Börja med att trycka in axelklaffarna på båda sidor så långt det går och släpp sedan. Klaffarna kommer då att återgå till maxbredd.

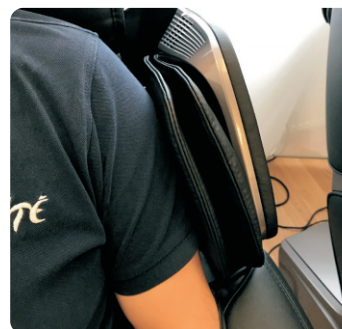

2. Sätt dig i massagefåtöljen

Sätt dig sedan i massagefåtöljen. Ett lagom avstånd från axlarna till klaffarna är om dina axlar snuddar vid luftkuddarna. Om de gör det så behövs ingen justering.

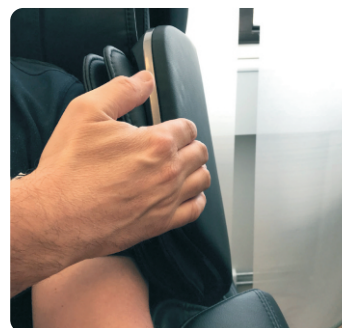

3. Justera klaffarna


Om dina axlar är en bit från klaffarna så kan du justera genom att dra klaffarna inåt. Det finns två lägen. Vi varje läge hörs ett klick. Skulle du råka justera klaffarna så att de ligger för nära dina axlar så lutar du dig framåt och upprepar punkt 1.

OBS! Försök ALDRIG att pressa klaffarna utåt med våld. De riskerar då att gå sönder.

Automatiska massageprogram

1 Sätt dig bekvämt tillrätta. Sitt så långt bak som möjligt


2 Tryck 

3 Tryck  för automatisk nedsänkning. Det finns två förinställda lägen. Tredje tryck återgår till utgångsläget.

4 Välj önskat massageprogram. Se sida 3.

5 Massagefåtöljen skannar in kroppslängden och anpassar sig automatiskt. Finjustera vid behov med UPP- eller NED-pilar. Sträck ut benen till önskad längd genom att pressa benen framåt i benmassagen.


6 Massagen startar. Lägg in armarna i armstöden för att även få armmassage.

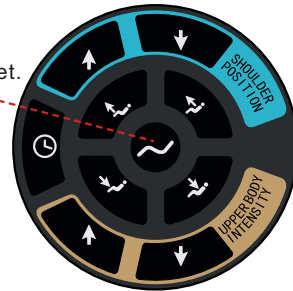

VID MASSAGENS SLUT

Tryck (två gånger)  Massagefåtöljen återgår automatiskt till utgångsläget. Låt massagefåtöljen resa dig. **OBS! Kliv inte ur massagefåtöljen i nerfällt läge.**

Automatiska massageprogram

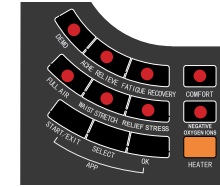

DEMO Programmet går igenom alla massagefunktioner under ca. 5 minuter.

På displayen
F0 Auto

COMFORT Milt massageprogram för uppmjukning av muskulaturen i hela kroppen.

På displayen
F1 Auto

FATIGUE RECOVERY Uppiggande massageprogram för snabb återhämtning.

På displayen
F2 Auto

ACHE RELIEVE Intensiv och djupgående helkroppsmassage för lindring av ömma muskler.

På displayen
F3 Auto

FULL AIR Avslappnande helkroppsmassage med enbart luftkuddar. Masserar Ländrygg, Säte, Armar och Ben samtidigt.

På displayen
F5 Auto

WAIST STRETCH Återhämtande Stretchprogram. Luftkuddar i benmassagen fixerar vader och benpartiet sänks och höjs. Sträcker och tänjer ländryggs, ben- och bäckenmuskulaturen.

På displayen
F6 Auto

RELIEF STRESS Lugnande massageprogram för avslappning.

På displayen
F7 Auto

EXTRAFUNKTION


NEGATIVE OXYGEN IONS Luftrenare aktiverar negativa syrejoner skapar bättre luft närmast dig under massagen. Tryck för att starta. Tryck 2 ggr för halv effekt. Tryck igen för att stänga av.

På displayen



Övriga justeringar

Övriga justeringar du kan göra under ett automatiskt program eller vid manuella inställningar.

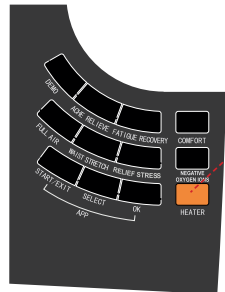


HEATER PÅ/AV värmeslinga i ryggdynan. Värmen når sin temperatur efter ca. 3 minuter.

Tidknapp – Tryck för att öka eller minska tiden. Varje tryck = 5 minuter. Förinställd tid 20 min. Maxtid 40 min.

3D-massage = reglering av styrkan i ryggmassagen

Höjer styrkan/intensiteten på ryggmassagen.

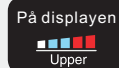

Sänker styrkan/intensiteten på ryggmassagen.

Regleringsknappar för rygg- och benmassage

Reser upp ryggstödet. Tryck för att starta, tryck igen för att stoppa i önskad position.

Sänk ner ryggstödet. Tryck för att starta, tryck igen för att stoppa i önskad position.

Höjer upp benmassagen. Tryck för att starta, tryck igen för att stoppa i önskad position.

Sänker ner benmassagen. Tryck för att starta, tryck igen för att stoppa i önskad position.

Finjusterar massagehuvudena uppåt vid axlarna.

Finjusterar massagehuvudena neråt vid axlarna.

Manuell styrning av massagen

Massagen kan styras manuellt genom att först välja ett AUTO-program. Välj program och öppna locket på handkontrollen.



SHOULDER GRASP Gripmassage för nacke och axlar.

KNEAD Knådmassage.

TAP Tapping = Rytmisk handkantsmassage. 2 lägen.

KNEAD&TAP Kombination knådmassage och tapping.

SHIATSU Punktmassage/Fingertrycksmassage. 2 lägen.

3D 3D Reglerar styrka/intensitet i ryggen. 8 nivåer.

SPEED Reglerar hastigheten och frekvensen i massagen.

WIDTH Reglerar bredden på massagehuvudena. 5 lägen. OBS! Endast vid TAP och BACK STRETCH.

SOLE ROLLER Knapp för rullmassage för fotsolor. 3 hastigheter samt AV/PÅ.

Manuell styrning av massagen



BACK STRETCH Stretch- och Rullmassage för ryggen. För att ändra område tryck flera gånger enligt nedan:

- H0 Punktmassage. Välj massagefunktion på sida 6
- H4 Massage på ett mindre område
- H1 Hela ryggen
- H2 Övre del av ryggen
- H3 Ländryggen



LOWER ADJUST **UPPER ADJUST** Reglera massagen upp och ned (endast under H0 eller H4)

FUNKTIONER FÖR LUFTKUDEMASSEGE



LOWER BODY Masserar säte, vader, ben och fötter. Totalt 3 lägen.



INTENSITY Reglerar trycket i luftkuddar. 3 nivåer. Läs av nivå i display.



ARTHROSIS TRACTION Masserar och fixerar vader. Benmassagen sänks för att sträcka ut underbenet och lindra artrossmärter i knän.



ARM AIR PRESSURE Reglerar styrkan och trycket i armmassage och axelmassage. 3 nivåer. Läs av nivå i display.

Styr massagefåtöljen med app



Börja med att ladda ner och öppna appen Future Class (iRest).

Appen finns i App Store, Google Play Butik m.fl.

För att byta språk klicka på Settings längst ner i höger hörn. Finns för tillfället endast i Engelsk eller Kinesisk version.

Tryck sedan på "A"

Välj sedan "English"

1. Aktivera Bluetooth på din smartphone/surfplatta och anslut till "Fihonest-XXXX".
2. Öppna Appen och aktivera programmet med denna knapp.
3. Nu är du redo att köra igång!


Montering av massagefåtöljens sidostycken



Börja med att föra upp massagefåtöljen i helt upprätt läge genom att trycka på följande knapp på fjärrkontrollen:




På insidan av sidorna sitter en luftslang samt en vit och en svartkontakt som skall kopplas ihop med motsvarande på fåtöljen. Läggs sidan på golvet bredvid massagefåtöljen. Lyft upp nederkanten för att lättare kunna koppla ihop kontakter och slangar. Håll emot och koppla ihop. Fukta munstycket något för att lättare dra slangen över munstycket

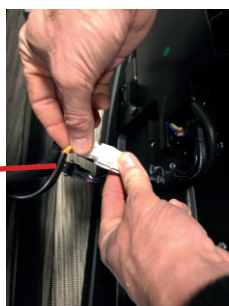

9

Montering av massagefåtöljens sidostycken

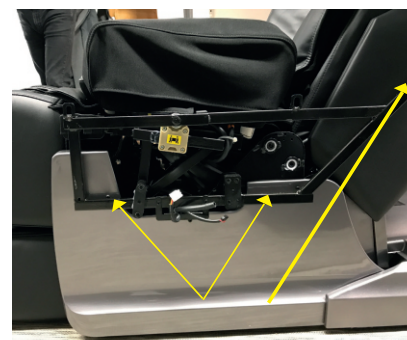

De svarta hakarna (röda pilar) som sitter på sidornas insidor ska hakas på den svarta ramen/ställningen (bild till vänster).

När sidan är fasthakad korrekt så ska de två hålen på den svarta ramen/ställningen ligga i linje med hålen på sidan (blå pilar). Hålen sitter lite tajt till mellan sidopanelen och sittedynan. Lys gärna med ficklampa eller mobiltelefonen för att se exakt var hålen är. Skruvar, brickor och insexnyckel finns i den medföljande kartongen.



Skruva åt med den medföljande insexnyckeln.

10

Garantivillkor och EU-deklaration

Leverantören/Återförsäljaren av den här Produkten lämnar en lagstadgad reklamationsrätt som gäller från och med leveransdatum. Reklamationsrätten gäller endast i Sverige och till privatpersoner enligt Konsumentköplagen.

För organisationer där Produkten är avsedd att användas för professionellt bruk, såsom på arbetsplatser inom privat och offentlig sektor, offentliga miljöer mm. gäller andra garantivillkor. Kontakta Leverantören/Återförsäljaren för information.

Inköpsdatum respektive leveransdatum ska styrkas med inköpskvittot för att garantin ska gälla. Leverantören/Återförsäljaren kommer kostnadsfritt att reparera eller ersätta de defekta delar på Produkt som registrerats i Sverige. Garantin gäller inte slitagedelar som exempelvis klädsel, dynor, kuddar och överdrag.

Kunden ansvarar för att Produkten sänds till Leverantören/Återförsäljaren för reparation. Efter reparation återsändes den reparerade Produkten till kunden. Förutsättning för kostnadsfri retursändning av reparerad Produkt är att detta måste ske före garantitidens utgång. Garantianspråket upphör att gälla om det fel som upptäckts har orsakats genom yttre påverkan eller som resultat av en reparation eller ändring som inte utförts av tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare/fackman. Leverantörens/Återförsäljarens garanti omfattar endast reparation, arbete eller byte av Produkten. Inom ramen för denna garanti åtar sig tillverkaren eller Leverantören/Återförsäljaren inget ansvar därutöver och ansvarar inte för skador som orsakas av att bruksanvisningen inte beaktas och /eller genom att Produkten används på ett icke ändamålsenligt sätt. Om Leverantören/Återförsäljaren vid kontroll av Produkten konstaterar att garantianspråket avser en defekt som inte omfattas av garantin eller att garantitiden har gått ut, ska kostnaderna för inspektion och reparation betalas av kunden.

För utförlig information om garantiåtaganden hänvisas till våra webbplatser: www.santesweden.se, www.messagefatolj.se, www.messagestolhemma.se

Rättslig information: Allt innehåll i denna bruksanvisning är endast instruktion och vägledning i handhavandet av Produkten och är inte på något sätt kopplade till påståenden om användarens hälsa. Eventuella diagnoser och behandlingar av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av specialist, läkare, naturläkare, terapeut etc. Informationen här i är endast informativa och ska inte användas som ersättning för medicinsk behandling. Varje användare är skyldig, att noggrant läsa igenom säkerhetsinstruktionen och i förekommande fall samråda med specialist, läkare e.d. för att bestämma om användningarna är lämpliga i det specifika fallet. Varje användning eller behandling i Produkten sker på användarens egen risk. Vi tar avstånd från alla hälsopåståenden eller löften.

EU-försäkran om överensstämmelse

Motsvarar de europeiska direktiven EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.

Tekniska specifikationer

Modell:	Massagefåtölj Santé Hoshi 3D
Märkspänning:	220-240V~50Hz/60Hz
Strömförbrukning:	150 W/h
Timer:	20 minuter
Säkerhetsklass	Class I
Märkning:	CE
Material:	PU-konstläder, Stål, Elektroniska, komponenter.

Mått & dimensioner

Upprätt:	80 x 127 x 142 cm.
Nedsänkt:	80 x 92 x 220 cm.
Vikt:	138 kg

Santé Sweden AB
Org.nr. 556646-7154
Internet: www.santesweden.se
E-post: info@santesweden.se
Telefon: 020-27 27 20

Copyright © Santé Sweden AB
Alla rättigheter förbehålles