



< timetorelax



TWIST^{2GO}



< timetorelax

Sedan starten år 2000, står namnet CASADA för högkvalitativa produkter på hälso-spa och fitnessmarknaden. Idag finns CASADA utrustning tillgänglig i 37 länder över hela världen.

Kontinuerlig vidareutveckling, en omisskännlig design och en fokuserad inriktning mot en bättre livskvalitet är det som kännetecknar CASADA produkter, lika mycket som dess oslagbara och pålitliga kvalitet.

Grattis!

Med köpet av denna massageenhet visar du att du är medveten om din hälsa.

För att njuta av fördelarna med din massageenhet på lång sikt, ber vi dig att läsa och följa bruksanvisningen noga.

Vi önskar dig mycket nöje med din personliga Twist2Go.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner	46
Inuti förpackningen.....	46
Start	46
Tekniska data	47
Specialfunktioner	47
Option.....	48
Kontrollpanel.....	48
Felsökning.....	48
Lagring/Underhåll.....	48
Konformitetsförklaring.....	49
Garantivillkor	49

Säkerhetsinstruktioner



Läs noga igenom följande instruktioner till innan du använder massageenhet för att säkerställa dess funktion och optimala effekt. Behåll dessa användarinstruktioner!

- Denna massageenhet överensstämmer med erkända tekniska principer och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Denna utrustning är underhållsfri. Alla nödvändiga reparationer måste utföras av en auktoriserad fackman. Felaktig användning och otillåtna reparationer är förbjudna av säkerhetsskäl och gör garantin ogiltig.
- Rör aldrig stickproppen med våta händer.
- Undvik att utrustningen kommer i kontakt med vatten, höga temperaturer och direkt solljus.
- Var noga med att koppla bort utrustningen från eluttaget under längre perioder av icke-användning för att eliminera risken för kortslutning.
- Använd inte skadade stickkontakter, sladdar eller lösa uttag. Skadade stickkontakter eller sladdar måste bytas ut av tillverkaren, servicerepresentant eller av kvalificerad personal. I händelse av felfunktion koppla ur utrustningen omedelbart. Vi tar inget ansvar för skador till följd av oriktig eller felaktig användning.
- För att förhindra alltför stor påfrestning på muskler och nerver, bör den rekommenderade massage-tiden på 30 minuter inte överskridas.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål
- All massage – även massage för hand – måste undvikas under graviditet och/eller vid ett eller flera klagomål i massageområdet: huvudsjukdomar, senaste skador, trombotiska sjukdomar, inflammationer och svullnad av något slag samt cancer. Samråd med din läkare rekommenderas före varje behandling av lidanden och krämpor.
- Använd inte enheten när du kör.
- Om du är beroende av elektriska hjälpmedel såsom en pacemaker, rådgör med din läkare innan användning i alla fall.

Inuti förpackningen

- Twist2Go
- Adapter
- Biladapter

Start

Anslut adaptern med enheten och koppla därefter in strömkontakten i eluttaget. Vrid nu på enheten via kontrollpanelen.

Med biladaptern kan Twist2Go också användas när du reser (inte användas när du kör!). Anslut bara biladaptern i cigarettändaruttaget.

Tekniska data

Enhetens mått:	35 x 23 x 15 cm
Vikt:	1,8 kg
Spänning adapter:	Ingång: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 A Utgång: 14 V = 1,7 mA
Spänning utrustning:	Batteri: litiumbatteri 11.1V/2200 mAh
Märkeffekt:	24 Watt
Gångtid:	1 – 1,5 timmar
Laddningstid:	3,5 timmar
Certifikat:	




Specialfunktioner



KNÅDNING

Här fattar man tag om hud och muskulatur och knådar, antingen med tummar och pekfingrar eller med båda händerna. Den här massagetechniken används framför allt för att lösa upp spänningar.

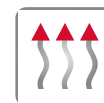

UPPVÄRMNING

En djupverkande och värmande funktion som får dig att spänna av fullständigt. Med sin djupverkande effekt passar den här funktionen särskilt bra för spända muskler.



TRÅDLÖS

Trådlös massageapparat.



TUMTRYCK

Runda massagehuvuden, som påminner om människans tumtoppen, ger en äkta massageupplevelse.


Tillbehör

De ytterligare aktiva banden garanterar inte bara den optimala placeringen av Twist2Go. De tar också ytterligare fördelar: Du kan reglera trycket på det drabbade området till dina egna behov och du kan njuta av din Twist2Go massage utan att behöva leta efter något att luta sig mot.



Kontrollpanel

- [1] På/Av**
Använd denna knapp för att starta Twist2Go (3 sek.). Funktionen knådning/Shiatsu och uppvärmning startar. Tryck den här knappen i ytterligare 3 sekunder för att stänga av Twist2Go.
- [2] Värme**
Använd den här knappen för att aktivera och åter inaktivera värmefunktionen.
- [3] Hastighet**
Använd den här knappen för att koppla om mellan två hastighetsnivåer.

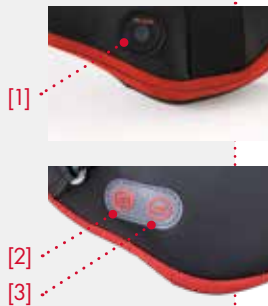

Felsökning

Fel	Justering
Massageenheten kan inte fungera trots att den har anslutits till elnätet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera anslutningen till adaptern• Enheten kan vara överhettad efter långvarig användning. Det kommer automatiskt att svalna för att återuppta sitt normala tillstånd. Stäng av strömmen och låt enheten svalna i 30 till 50 minuter.

Lagring/Underhåll

Regelbundet underhåll förlänger livslängden på din Twist2Go vilket också garanterar säker drift i alla lägen.

- 1 Rekommenderad lagring: torrt, dammfritt.
- 2 Håll vätskor och öppen eld borta från Twist2Go.
- 3 Rengör utrustningen med användning av en torr, mjuk trasa.
- 4 Dra alltid ur Twist2Go när den inte används.

Konformitetsförklaring

Överensstämmer med EU-direktiven EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Garantivillkor

Återförsäljaren ger den lagstadgade garanti tiden på den produkt som beskrivs på nästa sida. Garantin gäller från inköpsdatum. Inköpsdatum anges på inköpskvittot. Återförsäljaren skall reparera eller ersätta produkter gratis som är registrerade i Tyskland och som befinns vara defekta. Delar utsatta för slitage såsom tyg täcker inte omfattas. För att begära ditt anspråk, skicka helt enkelt tillbaka den felaktiga produkten med kvittot före utgången av garantiperioden. Garantianspråket gäller inte om det kan fastställas att ett fel har inträffat, t.ex. genom yttre påverkan eller som ett resultat av en reparation eller ändring som inte utförts av tillverkaren eller av en auktoriserad återförsäljare. Garantin som beviljas av säljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Under denna garanti, har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och är inte ansvariga för skador som orsakats av åsidosättande av bruksanvisningen och / eller felaktig användning av produkten. Om undersökning av produkten av säljaren visar att garantianspråket hänförs till en defekt som inte täcks av garantin eller att garantitiden har gått ut, skall kostnaden för inspektion och reparation betalas av kunden.

Santé Sweden AB
www.santesweden.se

Casada International GmbH
www.casada.com

Copyright bilder och texter är föremål för upphovsrätt till Casada International GmbH och får inte användas för andra ändamål utan uttrycklig bekräftelse.
Copyright © 2020 Casada International GmbH. Med förbehåll för alla rättigheter.



